

Produktinformation: 20475

Steckbeckenklarspüler

- Entkalker und Klarspüler mit guter Reinigungsleistung in einem
- zur Enthärtung und Kalkreduktion auch bei hohen Wasserhärten
- geeignet für alle thermischen Steckbeckenspülautomaten
- keine Ablagerungen auf dem Spülgut und innerhalb der Maschine (Düsen und Leitungen)



RHEOSOL-STK Steckbeckenklarspüler

Saurer Spezialklarspüler mit Kalkstopp

Produktbeschreibung

Saurer, schaumgedämpfter Klarspüler und Enthärter für die Steckbeckenaufbereitung in thermischen Desinfektionsverfahren. Für Steckbeckenspüler und Fäkalienpülautomaten im medizinischen Bereich. Geeignet für die thermische Aufbereitung von Pflegegeschirr (Edelstahl, Kunststoff, Glas) in allen handelsüblichen Geräten (gem. DIN 15833).

Anwendungsbereiche

Für Steckbeckenspüler und Fäkalienpülautomaten im medizinischen Bereich.

Anwendungshinweise

Beachten Sie bitte die Vorgaben des Maschinenherstellers.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Empfohlen	0,5 – 2g / Liter	je nach Maschineneinstellung und Wasserhärte

Zusammensetzung

5-15% nichtionische Tenside, <5% Polycarboxylate, <5% Phosphonate. Weitere Inhaltsstoffe: Lösevermittler, organische Säuren, Methylchloroisthiazolinone, Methylisothiazolinone.

Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert (Anwendung) 4-5
- pH-Wert (Konzentrat) 3

Kennzeichnung gem. GHS

- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
- P264 - Nach Gebrauch Hände mit Wasser gründlich waschen.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- EUH209 - Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden.

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Dieses Produkt ist ohne besondere Begrenzung bei lichtgeschützter und kühler Lagerung haltbar - stets geschlossen lagern.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20475050	RHEOSOL-STK Steckbeckenklarspüler Kanister 5 Liter	Kanister

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.com.

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.