


Produktinformation: 20505

Vollviruzides Desinfektionsmittel

- RKI-Listung (§18 IfSG) im Wirkungsbereich AB
- einsetzbar als Instrumentendesinfektion, Flächendesinfektion und Wäschedesinfektion bei behördlich angeordneter Entseuchung
- breites Wirkungsspektrum (inkl. behüllte und unbehüllte Viren)
- Formalin > 35% DAB

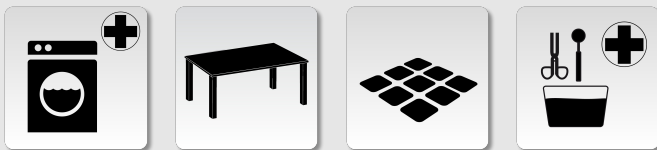

RHEOSEPT-D+ ultra

Desinfektionsmittel zum Einsatz im Falle einer behördlich angeordneten Entseuchung (§18 IfSG)

Produktbeschreibung

Vollviruzides Desinfektionsmittelkonzentrat zur Instrumentendesinfektion, Wäschedesinfektion und Flächendesinfektion. Zum Einsatz im Falle einer behördlich angeordneten Entseuchung (§18 IfSG). Gelistet beim RKI im Wirkungsbereich AB unter dem Namen Formaldehyd-Lösung DAB 10 (Formalin). "Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen."

Anwendungsbereiche

Zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionserkrankungen. Für den institutionellen Einsatz in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen im Seuchenfall.

Anwendungshinweise

Zur Flächendesinfektion (Wischen) eine 3% Gebrauchslösung (3% RHEOSEPT-D+ ultra und 97% Wasser)

herstellen und 4 Stunden einwirken lassen. Zur Instrumentendesinfektion laut RKI Liste Wirkbereich AB eine 6% Gebrauchslösung herstellen (6% RHEOSEPT-D+ ultra und 94% Wasser) und mind. 1 Stunde einwirken lassen. Zur Wäschedesinfektion 1,5% Gebrauchslösung (1,5% RHEOSEPT-D+ ultra und 98,5% Wasser) herstellen und 12 Stunden einwirken lassen (siehe Dosierangaben Produktinformation). Nach erfolgter Desinfektion mit klarem Wasser nachspülen. Wir empfehlen anschließend die im Hygieneplan vorgesehene Aufbereitung. Eine behördlich angeordnete Entseuchung unterliegt der Dokumentationspflicht. Dämpfe nicht einatmen und für gute Belüftung der Umgebung sorgen.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung / Einwirkzeit
RKI-Wäschedesinfektion	1,5%	RKI-Liste AB bei 12 Stunden
RKI-Instrumentendesinfektion	6 %	RKI-Liste AB bei 1 Stunde
RKI-Flächendesinfektion	3%	RKI-Liste AB bei 4 Stunden

Zusammensetzung

Formalin DAB 10 (Formaldehydlösung).

Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert 3,5 - 4,5 (Konzentrat)

Kennzeichnung gem. GHS

- H301 + H311 + H331 - Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
- H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335 - Kann die Atemwege reizen.
- H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350 - Kann Krebs erzeugen.
- H370 - Schädigt die Organe .
- P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Besondere Hinweise

Angaben zur Sicherheit befolgen! Unbedingt Schutzkleidung tragen! Hand- und Augenschutz tragen. Stets geschlossen lagern. Nur für professionelle Anwender (für den gewerblichen Einsatz durch geschultes und eingewiesenes Personal). Für den gewerblichen Bereich.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20505352	RHEOSEPT-D+ ultra Flasche 1000 ml	Karton
20505050	RHEOSEPT-D+ ultra Kanister 5 Liter	Kanister

Zubehör

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
48017002	Kanisterhahn Gewinde 51 für 5/10 Liter Kanister	Stück
48020002	Kanisterpumpe Gewinde 51 mm für 5/10 Liter UN-Kanister	Stück
48038005	Kanisterschlüssel für Verschluss mit Gewinde 51	Stück
48029002	Flaschenhalter für 4 Flaschen à 1000 ml	Stück
48029006	Flaschenhalter für 6 Flaschen à 1000 ml Edelstahl	Stück
48041001	Schutzbrille mit Seitenschutz, einzeln verpackt in Folie, mit Kunststoffglas	Stück
48036001	Schutzhandschuhe gelb, Größe S, 12 Paar im Paket	Packung
48036006	Schutzhandschuhe gelb, Größe M, 12 Paar im Paket	Packung
48036005	Schutzhandschuhe gelb, Größe L, 12 Paar im Paket	Packung
48036003	Schutzhandschuhe gelb, Größe XL, 12 Paar im Paket	Packung
48036002	Schutzhandschuhe blau Latex, säure- und alkaliefest, 12 Paar im Paket	Packung

Registrierungen

Gelistet gemäß §18 IfSG beim RKI zur behördlich angeordneten Entseuchung als Formalin DAB 10. Anwendbar gem. § 18 IfSG (Infektionsschutzgesetz) nach der RKI-Desinfektionsliste (Robert Koch Institut). Entspricht DAB (Deutsches Arzneibuch).

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.de.

RHEOSEPT®

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

RHEOSOL®

Wachendorff-Chemie GmbH • Langbaughstr. 15 • DE 53842 Troisdorf
☎ +49 2241 3923-0 📠 +49 2241 3923-90 ✉ info@rheosol.de 🌐 <http://www.rheosol.com>