


Produktinformation: 20505

Vollviruzides Desinfektionsmittel

- RKI-Listung (§18 IfSG) im Wirkungsbereich AB
- einsetzbar als Instrumentendesinfektion, Flächendesinfektion und Wäschedesinfektion bei behördlich angeordneter Entseuchung
- breites Wirkungsspektrum (inkl. behüllte und unbehüllte Viren)
- Formalin > 35% DAB

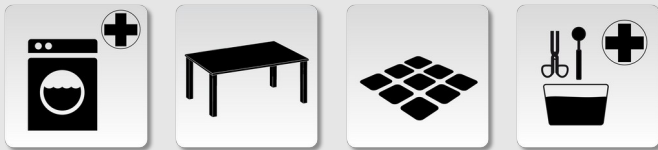

## RHEOSEPT-D+ ultra

Desinfektionsmittel zum Einsatz im Falle einer behördlich angeordneten Entseuchung (§18 IfSG)

### Produktbeschreibung

Vollviruzides Desinfektionsmittelkonzentrat zur Instrumentendesinfektion, Wäschedesinfektion und Flächendesinfektion. Zum Einsatz im Falle einer behördlich angeordneten Entseuchung (§18 IfSG). Gelistet beim RKI im Wirkungsbereich AB unter dem Namen Formaldehyd-Lösung DAB 10 (Formalin). "Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen."

### Anwendungsbereiche

Zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionserkrankungen. Für den institutionellen Einsatz in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen im Seuchenfall.

### Anwendungshinweise

Zur Flächendesinfektion (Wischen) eine 3%

Gebrauchslösung (3% RHEOSEPT-D+ ultra und 97% Wasser) herstellen und 4 Stunden einwirken lassen. Zur Instrumentendesinfektion laut RKI Liste Wirkungsbereich AB eine 6% Gebrauchslösung herstellen (6% RHEOSEPT-D+ ultra und 94% Wasser) und mind. 1 Stunde einwirken lassen. Zur Wäschedesinfektion 1,5% Gebrauchslösung (1,5% RHEOSEPT-D+ ultra und 98,5% Wasser) herstellen und 12 Stunden einwirken lassen (siehe Dosierangaben Produktinformation). Nach erfolgter Desinfektion mit klarem Wasser nachspülen. Wir empfehlen anschließend die im Hygieneplan vorgesehene Aufbereitung. Eine behördlich angeordnete Entseuchung unterliegt der Dokumentationspflicht. Dämpfe nicht einatmen und für gute Belüftung der Umgebung sorgen.

## Anwendungskonzentrationen

| Dosiervorgabe                | Dosierangabe   | Bemerkung / Einwirkzeit     |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| RKI-Wäschedesinfektion       | 1,5% (15 ml/l) | RKI-Liste AB bei 12 Stunden |
| RKI-Instrumentendesinfektion | 6% (60 ml/l)   | RKI-Liste AB bei 1 Stunde   |
| RKI-Flächendesinfektion      | ID10825        | RKI-Liste AB bei 4 Stunden  |

## Zusammensetzung

Formalin DAB 10 (Formaldehydlösung).

## Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert 3,5 - 4,5  
(Konzentrat)

## Kennzeichnung gem. GHS

- H301 + H311 - Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt
- H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H330 - Lebensgefahr bei Einatmen.
- H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350 - Kann Krebs erzeugen.
- H370 - Schädigt die Organe .
- P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264 - Nach Gebrauch Hände mit Wasser gründlich waschen.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

## Besondere Hinweise

Angaben zur Sicherheit befolgen! Unbedingt Schutzkleidung tragen! Hand- und Augenschutz tragen. Stets geschlossen lagern. Nur für professionelle Anwender (für den gewerblichen Einsatz durch geschultes und eingewiesenes Personal). Für den gewerblichen Bereich.

## Lieferformen

| REF      | Gebindegröße                       | Verpackungseinheit |
|----------|------------------------------------|--------------------|
| 20505352 | RHEOSEPT-D+ ultra Flasche 1000 ml  | Karton             |
| 20505050 | RHEOSEPT-D+ ultra Kanister 5 Liter | Kanister           |

## Registrierungen

Gelistet gemäß §18 IfSG beim RKI zur behördlich angeordneten Entseuchung als Formalin DAB 10. Anwendbar gem. § 18 IfSG (Infektionsschutzgesetz) nach der RKI-Desinfektionsliste (Robert Koch Institut). Entspricht DAB (Deutsches Arzneibuch).

## Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter [www.rheosol.com](http://www.rheosol.com) - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: [info@rheosol.com](mailto:info@rheosol.com).

## Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.