

Produktinformation: 20524

Schnelldesinfektion

- anwendungsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion
- extrem schnelle bakterizide, tuberkulozide und begrenzt viruzide Wirksamkeit
- aldehydfrei, ohne Deckparfum
- schnelle rückstandsfreie Trocknung
- hautfreundlich mit Dermatest "sehr gut"
- VAH- gelistet



CE
0044

RHEOSEPT-SD plus

Alkoholische Schnelldesinfektion

Produktbeschreibung

Aldehydfreie Schnelldesinfektion mit angenehmen Geruchseigenschaften zur Durchführung schneller und umfassender Desinfektionsmaßnahmen. Das Produkt trocknet annähernd ohne Rückstände auf. Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid (HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2) und Noro. Dieses Medizinprodukt ist CE-zertifiziert (0044).

Anwendungsbereiche

Zur Schnelldesinfektion von allen wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten

(nicht Acryl oder Plexiglas). Zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionserkrankungen. Für den professionellen Einsatz in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Anwendungshinweise

Vor der Desinfektion die Fläche von Verschmutzungen und Nässe befreien. Die flüssige gebrauchsfertige Lösung auf ein Tuch geben und die trockene Oberfläche gleichmäßig benetzen. Die Oberfläche sollte ausreichend benetzt sein. Ein direktes Sprühverfahren nur dann benutzen, wenn es unumgänglich ist. Die Einwirkzeit sollte mindestens 1 Minute betragen (Produktinformation). Nicht auf Acryl

(Plexiglas) verwenden. Eiweisse können die Desinfektionswirkung herabsetzen.

Wirkungsspektrum

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid (HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2) und Noro.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Einwirkzeit 1 Minute	unverdünnt	bakterizid / levurozid (DGHM) - niedrige und hohe Belastung
Einwirkzeit 1 Minute	unverdünnt	bakterizid (EN13727), levurozid (EN13624) - niedrige und hohe Belastung
Einwirkzeit 5 Minuten	unverdünnt	bakterizid / levurozid (EN16615 / VAH) - niedrige Belastung / Mechanik (Referenz Tuch)
Einwirkzeit 1 Minute	unverdünnt	bakterizid / levurozid (DGHM) - niedrige und hohe Belastung (Flächenversuch)
Einwirkzeit 30 Sekunden	unverdünnt	begrenzt viruzid (DVV / RKI - HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2)
Einwirkzeit 1 Minute	unverdünnt	Norovirus (EN14476)
Einwirkzeit 1 Minute	unverdünnt	TBC

Zusammensetzung

100 g enthält: 37g Ethanol, 13g Propan-2-ol, 0,08g Alkylbiguanid.

Physikalisch-chemische Daten

➤ Flash point >21°C

Kennzeichnung gem. GHS

- H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
- P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370 + P378 - Bei Brand: Schaum, Pulver oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden.
- P403 + P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Besondere Hinweise

Chargennummer und Verwendbarkeitsdatum als gesonderten Aufdruck auf der Verpackung beachten. Nur für professionelle Anwender (für den gewerblichen Einsatz durch geschultes und eingewiesenes Personal). Ein Nachspülen mit Wasser ist in der Regel nicht notwendig. Produkt trocknet annähernd rückstandsfrei auf. Je nach Einsatzbereich des Medizinproduktes ist nach der Desinfektion die Oberfläche sorgfältig mit Wasser nachzuspülen, um mögliche Produktreste zu entfernen. Stets verschlossen, trocken, kühl (Raumtemperatur) und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20524370	RHEOSEPT-SD plus Flasche 750 ml	Karton
20524352	RHEOSEPT-SD plus Flasche 1000 ml mit Sprayer	Karton
20524050	RHEOSEPT-SD plus Kanister 5 Liter	Kanister
20524100	RHEOSEPT-SD plus Kanister 10 Liter	Kanister

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren

RHEOSEPT®

Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail:
info@rheosol.com.

Zulassung

Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0044).

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.