


Produktinformation: 20550

Flächendesinfektion

- > anwendungsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion
- > wirksam gegen Bakterien und Viren
- > aldehydfrei, ohne Deckparfum
- > schnelle rückstandsfreie Trocknung

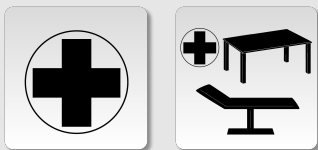

rheomed-Flächendesinfektion

Flächendesinfektion für die Pflege im häuslichen Bereich

Produktbeschreibung

Aldehydfreie Wischdesinfektion mit angenehmen Geruchseigenschaften zur Durchführung schneller und umfassender Desinfektionsmaßnahmen.

Anwendungsbereiche

Zur Schnelldesinfektion von allen wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen (nicht Acryl oder Plexiglas).

Anwendungshinweise

Vor der Desinfektion die Fläche von Verschmutzungen und Nässe befreien. Die flüssige gebrauchsfertige Lösung auf ein Tuch geben und die trockene Oberfläche gleichmäßig benetzen. Die Oberfläche sollte ausreichend benetzt sein. Ein direktes Sprühverfahren nur dann benutzen, wenn es unumgänglich ist. Die Einwirkzeit sollte mindestens 1 Minute betragen. Nicht auf Acryl (Plexiglas) verwenden.

Eiweiße können die Desinfektionswirkung herabsetzen. Biozide sicher verwenden.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
60 Sekunden	unverdünnt	Bakterizid

Zusammensetzung

100g enthalten: 25g Ethanol, 12g Propan-2-ol, 0,2g Alkylbiguanid.

Physikalisch-chemische Daten

- > Flammpunkt >21°C

Kennzeichnung gem. GHS

- H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403 + P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Besondere Hinweise

Ein Nachspülen mit Wasser ist in der Regel nicht notwendig. Produkt trocknet annähernd rückstandsfrei auf. Je nach Einsatzbereich ist nach der Desinfektion die Oberfläche sorgfältig mit Wasser nachzuspülen, um mögliche Produktreste zu entfernen. Behälter dicht geschlossen halten und vor Sonneneinstrahlung schützen. Chargennummer und Verwendbarkeitsdatum als gesonderten Aufdruck auf der Verpackung beachten.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20550340	rheomed- Flächendesinfektion Eurospenderpatrone 500 ml	Karton
20550345	rheomed- Flächendesinfektion Sprayflasche 500 ml	Karton

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.de.

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.