

Produktinformation: 20568

Absauganlagenaufbereitung

- hochwirksame hygienische Aufbereitung von Absauganlagen und Amalgamabscheidern
- löst Schmutzablagerungen und bindet Speichelreste und Bohrstäube
- hygienische Konservierung der Auffangbehälter
- hohe Materialverträglichkeit
- aldehyd-, phenol- und chlorfrei



CE
0044

RHEOSEPT-Absauganlagenaufbereitung D

Desinfektionskonzentrat für Absauganlagen in der Dentalpraxis für den täglichen Gebrauch

Produktbeschreibung

Schaumarmes Reinigungskonzentrat für Absauganlagen und Amalgamabscheider für die tägliche Aufbereitung. Hygienisch durch konservierende und mikrobiozide Wirkung. Hohes Schmutzlöseverhalten gegenüber Ablagerungen, Speichelresten und Bohrstäuben. Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert.

Anwendungsbereiche

Zur Aufbereitung von Dentalabsauganlagen und Amalgamabscheidern aller Bauarten im medizinischen Bereich.

Anwendungshinweise

2% Lösung (bis max. 60°C) 15 Minuten einwirken lassen und direkt absaugen (siehe Dosierangaben

Produktinformation). Anlage entsprechend den Hinweisen der Gerätehersteller reinigen. Das Produkt ist biologisch abbaubar und kann bedenkenlos dem Abwasser zugeführt werden. Es wird empfohlen RHEOSEPT-Absauganlagenaufbereitung W zur wöchentlichen Wechselreinigung und zur Sedimententfernung einzusetzen.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
15 Minuten	2% (20 ml/l)	bei max. 60°C Reinigungstemperatur

Zusammensetzung

100 g enthalten: 13 g Isopropanol, 8,5 g 2-Amino-ethanol, 5 g Benzalkoniumchlorid, Weitere Inhaltsstoffe: nichtionische

Tenside, Schaumregulatoren, Farbstoff.

Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert 12-12,5
(Konzentrat)

Kennzeichnung gem. GHS

- H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264 - Nach Gebrauch Hände mit Wasser gründlich waschen.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
- P321 - Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20568050	RHEOSEPT- Absauganlagenaufbereitung D Kanister 5 Liter	Kanister

Besondere Hinweise

Geschlossen, frostfrei, lichtgeschützt und kühl lagern.

Registrierungen

Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert.

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.com.