

Produktinformation: 20569

Absauganlagenaufbereitung

- speziell für Absauganlagen und Amalgamabscheider
- entfernt Eiweiße und Sedimente
- entkalkend
- ideal zur wöchentlichen Wechselreinigung



## RHEOSEPT-Absauganlagenaufbereitung W

Konzentrat für Absauganlagen in der Dentalpraxis für die wöchentliche Wechselreinigung

### Produktbeschreibung

Saures, aldehyd-, phenol- und chlorfreies, schaumarmes Aufbereitungsmittel für Absauganlagen und Amalgamabscheider. Zur wöchentlichen Wechselreinigung oder zur Entfernung von Sedimenten als Ergänzung zu RHEOSEPT-Absauganlagenaufbereitung D. Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert.

### Anwendungsbereiche

Für die wöchentliche Hygiene in Dentalabsauganlagen und Amalgamabscheidern aller Bauarten im medizinischen Bereich. Entfernt speziell Eiweiße und Sedimente, wie Kalkniederschläge und andere Ablagerungen. Zur wöchentlichen Wechselreinigung der Absauganlage im Wechsel mit RHEOSEPT-Absauganlagenaufbereitung D.

### Anwendungshinweise

2% Lösung (bis max. 60°C) 15 Minuten einwirken lassen und

direkt absaugen (siehe Dosierangaben Produktinformation). Anlage entsprechend den Hinweisen der Gerätehersteller reinigen. Das Produkt ist biologisch abbaubar und kann bedenkenlos dem Abwasser zugeführt werden. Wöchentlich, bei Bedarf auch öfter im Wechsel mit RHEOSEPT-Absauganlagenaufbereitung D, einsetzen.

### Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
15 Minuten	2% (20 ml auf 1 Liter Wasser)	bei max. 60°C Reinigungstemperatur

### Zusammensetzung

100g enthalten: 12,0g Isopropanol. Weitere Inhaltsstoffe: Organische Säure, Reinigungstenside, Korrosionsinhibitoren, Schaumregulatoren, Farbstoff.

## Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert 3-4  
(Konzentrat)

## Kennzeichnung gem. GHS

- H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

## Besondere Hinweise

Geschlossen, frostfrei, lichtgeschützt und kühl lagern.

## Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20569050	RHEOSEPT- Absauganlagenaufbereitung W Kanister 5 Liter	Kanister

## Zubehör

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
48017002	Kanisterhahn Gewinde 51 für 5/10 Liter Kanister	Stück
48020002	Kanisterpumpe Gewinde 51 mm für 5/10 Liter UN- Kanister	Stück
48038005	Kanisterschlüssel für Verschluß mit Gewinde 51	Stück
48041001	Schutzbrille mit Seitenschutz, einzeln verpackt in Folie, mit Kunststoffglas	Stück
48036001	Schutzhandschuhe gelb, Größe S, 12 Paar im Paket	Packung
48036006	Schutzhandschuhe gelb, Größe M, 12 Paar im Paket	Packung
48036005	Schutzhandschuhe gelb, Größe L, 12 Paar im Paket	Packung
48036003	Schutzhandschuhe gelb, Größe XL, 12 Paar im Paket	Packung
48036002	Schutzhandschuhe blau Latex, säure- und alkaliefest, 12 Paar im Paket	Packung

## Registrierungen

Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert.

## Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → [www.rheosol.com](http://www.rheosol.com) - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: [info@rheosol.de](mailto:info@rheosol.de).

## Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.