

Produktinformation: 20569

Absauganlagenaufbereitung

- speziell für Absauganlagen und Amalgamabscheider
- entfernt Eiweiße und Sedimente
- entkalkend
- ideal zur wöchentlichen Wechselreinigung



RHEOSEPT-Absauganlagenaufbereitung W

Konzentrat für Absauganlagen in der Dentalpraxis für die wöchentliche Wechselreinigung

Produktbeschreibung

Saures, aldehyd-, phenol- und chlorfreies, schaumarmes Aufbereitungsmittel für Absauganlagen und Amalgamabscheider. Zur wöchentlichen Wechselreinigung oder zur Entfernung von Sedimenten als Ergänzung zu RHEOSEPT-Absauganlagenaufbereitung D. Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert.

Anwendungsbereiche

Für die wöchentliche Hygiene in Dentalabsauganlagen und Amalgamabscheidern aller Bauarten im medizinischen Bereich. Entfernt speziell Eiweiße und Sedimente, wie Kalkniederschläge und andere Ablagerungen. Zur wöchentlichen Wechselreinigung der Absauganlage im Wechsel mit RHEOSEPT-Absauganlagenaufbereitung D.

Anwendungshinweise

2% Lösung (bis max. 60°C) 15 Minuten einwirken lassen und direkt absaugen (siehe Dosierangaben Produktinformation). Anlage entsprechend den Hinweisen der Gerätehersteller reinigen. Das Produkt ist biologisch abbaubar und kann bedenkenlos dem Abwasser zugeführt werden. Wöchentlich, bei Bedarf auch öfter im Wechsel mit RHEOSEPT-Absauganlagenaufbereitung D, einsetzen.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
15 Minuten	2% (20 ml/l)	bei max. 60°C Reinigungstemperatur

Zusammensetzung

100 g enthalten: 13,7 g Isopropanol, 10,7 g nichtionische

RHEOSEPT®

Tenside, 8 g Zitronensäure, 3,9 g Polycarboxylate, 4,5 g anionische Tenside Weitere Inhaltsstoffe: Konservierungsmittel (Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone).

Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert 3-4 (Konzentrat)

Kennzeichnung gem. GHS

- H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315 - Verursacht Hautreizungen.
- H315 - Verursacht Hautreizungen.
- H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
- H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P321 - Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P370 + P378 - Bei Brand: Schaum, Pulver oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden.
- P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403 + P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Besondere Hinweise

Geschlossen, frostfrei, lichtgeschützt und kühl lagern.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20569050	RHEOSEPT-Absauganlagenaufbereitung W Kanister 5 Liter	Kanister

Registrierungen

Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert.

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie

unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.com.

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.