

Produktinformation: 22511

Steckbeckenreiniger

- wirkungsvoller, materialschonender Steckbeckenreiniger mit hoher Schmutzlösewirkung
- zur effektiven Reinigung von Urinflaschen, Steckbecken und Bettpfannen
- geeignet für alle thermischen Steckbeckenspülautomaten
- Medizinprodukt - CE-zertifiziert



RHEOSOL-STR Steckbeckenreiniger

Spezialreiniger für Steckbecken-Spülautomaten

Produktbeschreibung

Wirkungsvolles, materialschonendes Spülmittel. Mit hoher Schmutzlösewirkung. Zur Reinigung von Steckbecken, Bettpfannen und Urinflaschen. In Reinigungsautomaten zur Dosierung mit Dosierpumpen. Verhindert Kalkablagerungen. Dieses Medizinprodukt ist CE-zertifiziert.

Anwendungsbereiche

Zur Reinigung von Steckbecken, Bettpfannen und Urinflaschen.

Anwendungshinweise

Die Vorschriften des Maschinenherstellers sind zu beachten. 1-5g/Liter bei ca. 50-90°C Anwendungstemperatur. Geeigneter Klarspüler: RHEOSOL-STK Steckbeckenklarspüler.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
0-7° dH (weich)	1 – 2g / Liter	-
7-14° dH (mittel)	2 – 3g / Liter	-
14- 21° dH (hart)	3 – 4g / Liter	-
über 21° dH (sehr hart)	> 5g / Liter	-

Zusammensetzung

1-5% nichtionische Tenside, 1-5% amphotere Tenside, 5-15% NTA. Weitere Inhaltsstoffe: Dispergiermittel, Hilfsstoffe.

Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert (Anwendung) 10-12
- pH-Wert (Konzentrat) 13

Kennzeichnung gem. GHS

- H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264 - Nach Gebrauch Hände mit Wasser gründlich waschen.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
- P321 - Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
22511050	RHEOSOL-STR Steckbeckenreiniger Kanister 5 Liter	Kanister

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.com.

Zulassung

Dieses Medizinprodukt ist CE-zertifiziert (0044).

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.