


- anwendungsfertige Oralspülung zur Reinigung und Keimreduktion
- frei von Alkohol, Chlorhexidin und Zucker
- unterstützt den Heilungsprozess bei Entzündungen
- geeignet zur Desinfektion von Zahnprothesen

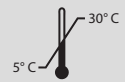

## rheodol-Liquid plus

### Reinigende und keimreduzierende Mundspülung

#### Produktbeschreibung

Mundhygienespülung mit keimreduzierender Wirksamkeit und sanfter reinigender Wirkung. Durch milde Inhaltsstoffe auch für den dauerhaften Einsatz geeignet, da es nicht zu Zahnverfärbungen kommt. Das Produkt ist ohne Zucker und Alkohol und enthält kein Chlorhexidin. Die Spülung unterstützt und erhält die natürliche Abwehrfunktion der Mundhöhle und schützt zuverlässig vor Mundgeruch.

#### Anwendungsbereiche

Empfohlen als Ergänzung zur Zungen-, Zahn- und Mundreinigung sowie zur Desinfektion von Zahnprothesen. Besonders gut geeignet bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Vorbeugung von Erkrankungen in der Mundhöhle und Unterstützung der Heilung von Gingivitis, Parodontitis und Stomatitis. Das ideale Produkt für Risikogruppen, da langfristige Anwendung möglich und die natürliche Funktion der Mundhöhle nicht beeinträchtigt wird. Geeignet für die häusliche Anwendung sowie für den Pflege- und Klinikbereich.

#### Anwendungshinweise

Spülung nicht schlucken und nicht nachspülen. Mit 10 ml (siehe Messbecher) unverdünnt spülen und bei Halsbeschwerden gurgeln. Die Spülung kann in der Patientenpflege durch getränkte Träger in die Mundhöhle eingebracht werden. Nach jedem Zähneputzen anwenden bzw. nach jeder Reinigung des Mundraumes. Bei Bedarf kann sie auch zwischendurch eingesetzt werden. Zur Desinfektion von herausnehmbarer Zahnprothetik die Prothese im Tauchbadverfahren in unverdünnter Flüssigkeit mindestens 1 Minute tauchen.

## Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Mundspülung	1 Minute / 10 ml	unverdünnt spülen, evtl. gurgeln
Herausnehmbare Zahnprothetik	1 Minute / Geeignete Menge je nach Zahnprothesenbecher (Prothese muss komplett in der Flüssigkeit eingetaucht sein)	Unverdünnt im Tauchbadverfahren

rheodol-Liquid plus ist das ideale Produkt für Risikogruppen, da sie dauerhaft angewandt werden kann, ohne die natürlichen Funktionen der Mundhöhle zu stören. Sie eignet sich für die häusliche Anwendung und für den Pflege- und Klinikalltag.

## Unverträglichkeit

Gem. Anwendungsbeobachtungen sind ursächlich keine Unverträglichkeiten festgestellt worden. Das Produkt ist für Kleinkinder ab einem Körpergewicht von 3 kg als unbedenklich eingestuft.

## Zusammensetzung

In 100 g sind enthalten: 0,025g POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE, 0,005g CHLORAMINE T. Weitere Inhalstoffe: PHENYLANINE, XYLITOL, TETRASODIUM EDTA, ALLANTOIN, AROMA, C.I. 42051.

## Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
71024001	rheodol-Liquid plus Flasche 250 ml	1 Karton mit 6 Flaschen

## Registrierungen

Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert.

## Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

## Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter [www.rheosol.com](http://www.rheosol.com) - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: [info@rheosol.com](mailto:info@rheosol.com).

## Besondere Hinweise

Wenn Sie von Ihrem Arzt andere Hinweise bekommen, sind diese selbstverständlich zu befolgen, da sie auf Ihren speziellen Fall abgestimmt sind. Trocken und lichtgeschützt lagern.